

Elite Fuji

High Pressure Sterilizer

MODEL : EAC-2200S

未包装品用高压蒸汽灭菌器



※2 ご注文時に右の付属品1、又は付属品2から選択ください。



付属品1：滅菌トレーセット



付属品2：滅菌バスケットセット

■ 使い易さへの追求

- 全自動マイコンシステムと高速給水ポンプを搭載しており操作パネルをシンプルに使い易さを重視しております。滅菌室への水の給水は操作パネル部の給水ボタン(AUTO)を押すことで自動的に給水が完了致します。その後、ハンドルを締め込む事で予め時間設定した滅菌、乾燥を自動に行います。
- 又、排水ホースを側面前方に設置する事で貯水タンク内の水量が水位シールにて一目で判断できます。

■ コストバランスへの追求

- 操作パネルのスイッチ・パネル類を必要最低限にし、制御システムの無駄を削ぎ落とす事で使い易さと同時にコストバランスに優れた製品に努めております。

■ 動作モードは基本動作の2種類(AUTO / DRY)

- AUTO=通常使用される滅菌⇒乾燥モードです。 DRY=乾燥工程のみ行う追加乾燥モードです。
- 乾燥時間は0(ゼロ)設定が可能ですので、歯科用タービンをはじめ乾燥不可/不要な器具にもご使用いただけます。

■ 安全への対策(圧力安全システム)

- 滅菌作業中にブレーカーが落ちてしまったり等の本製品への電源が急に切れた場合、自動的に減圧作業を行い滅菌室内を安全な状態にします。
- 電源スイッチをOFFにする事でいかなる場合でも自動的に滅菌室内の圧力を減圧します。※1
- その他、空焚き警告、圧力異常上昇防止バルブが内蔵されておりますので安全にご使用いただけます。

EAC-2200S 製品規格・仕様

缶体寸法 / 容量	φ 220 x 378 mm / 14.0 L	加熱ヒーター	1,300 W
缶体材質	SUS 304 L	外部推奨ブレーカー	15 A 以上
システム制御方式	マイクロプロセッサ制御※3	電源ケーブル規格 / コネクター形状	VCTF 2.0 x 3 C / 医療用3Pコネクター
ドア開閉方式	締め込みハンドル方式	外形寸法(WxDxH)※1	475 x 450(600) x 370 mm
貯水タンク / 容量	本体内部蔵型 / 3.3 L	乾燥重量	30.0 Kg
滅菌温度設定	121 ℃ / 132 ℃ 切替スイッチ式	推奨設置面積(WxD)	505 x 490 mm
動作モード	滅菌&乾燥モード / 追加乾燥モード	動作音	通常 10dB以下, 最大 58dB以下(減圧時)
給水方式	ワンプッシュ自動給水	標準付属品※2	付属品1又は2、ヒーターガード、水受けトレイ取扱説明書、添付文書、製品保証書
使用電源	AC100V 50 / 60 Hz		
消費電力	MAX 1,300 VA	医療機器承認番号	22200BZX00235000
乾燥タイプ	ヒーター加熱方式	安全規格	JISC 61326-1:2017
安全装置	空焚き防止機能・圧力安全弁・緊急減圧システム・過電流プロテクター		

※1 () はハンドル部を含む奥行き。

※2 標準付属品として滅菌トレーセット又は滅菌バスケットセットのどちらかを選択いただけます。

※3 EAC-2200Sは連続滅菌には対応していないモデルです。滅菌作業終了後から次の滅菌開始まで15分程のインターバルが必要です。