

Elite High Pressure

High Speed Sterilizer



MODEL : EAC-2255V

連続滅菌対応高圧蒸気滅菌器



付属品1：滅菌トレイセット



付属品2：滅菌バスケットセット



2200S/2255V専用架台：KD-02

※4 付属品はご注文時に右の付属品1、又は付属品2から選択ください。

■ 連続滅菌対応システム搭載

- 従来の高圧蒸気滅菌器のインターバル(冷却時間) が必要なく作業終了後にすぐに次の滅菌作業を行う事ができます。ボイラー内蔵型の様に常時缶体を保持する必要がないのでコスト面に優れております。緊急時や診療数の多い医療施設に最適です。又、器具の回転効率を上げる事で器具コスト削減に繋がります。 滅菌温度134℃ 滅菌5分 / 乾燥5分の最短設定で最大で1時間に3回の滅菌乾燥作業が行えます。※1

■ 乾燥効率の向上

- 滅菌完了時の減圧の際 0.05Mpa時にて除菌エアーを滅菌室内へ送り込む事で減圧効率を向上させ減圧完了時の滅菌室内の蒸気の余剰を減らします。
- 乾燥工程ではヒーターにて暖気した除菌ドライエアーを滅菌室内へ毎分36/42L送り込み乾燥効率の向上を図っております。※2
- 採用される乾燥ポンプは全て弊社製品のピストン式オイルレス加圧ポンプを採用しております。従来のダイヤフラム式ポンプと違い高流量、そして高寿命ですので性能及び耐久性が飛躍的に向上しております。

■ シンプルな操作パネル

- 操作パネルのスイッチは滅菌時間・乾燥時間・給水・圧力設定・追加乾燥とシンプルになっております。
- 全てのスイッチが独立しており難しい操作を必要としない使い易さを重視に設計されております。
- 滅菌・乾燥の時間設定はパネル部に各設定ごとにデジタル表示されますので一目で設定時間がわかります。
- 乾燥時間は0(ゼロ)設定が可能ですので、歯科用タービンをはじめ乾燥不可/不要な器具にもご使用いただけます。※1
- 滅菌・乾燥各設定ごとに▲▼ボタンにて時間設定を行えるので設定間違いの心配がなく安心してご使用いただけます。

■ 安全への対策 (圧力安全システム)

- 滅菌作業中にブレーカーが落ちてしまったり等の本製品への電源が急に切れた場合、自動的に減圧作業を行い滅菌室内を安全な状態にします。
- 電源スイッチをOFFにする事でいかなる場合でも自動的に滅菌室内の圧力を減圧します。※1
- その他、空焚き警告、圧力異常上昇防止バルブが内蔵されておりますので安全にご使用いただけます。

EAC-2255V 製品規格・仕様

缶体寸法 / 容量 / 材質	φ220 x 378 mm / 14.0L / SUS 304L	加熱ヒーター	1,300 W
連続滅菌対応		外部推奨ブレーカー	15 A 以上
システム制御方式	マイクロプロセッサ制御	電源ケーブル規格 / コネクター形状	VCTF 2.0 x 3 C / 医療用3Pコネクター
ドア開閉方式	締め込みハンドル方式	外形寸法 (WxDxH) ※3	475 x 450(600) x 370 mm
貯水タンク / 容量	本体内部型 / 3.3 L	乾燥重量	35.0 Kg
滅菌温度設定	124 °C / 134 °C 切替スイッチ式	推奨設置面積 (WxD)	505 x 490 mm
動作モード	滅菌&乾燥モード / 追加乾燥モード	動作音	通常 10dB以下, 最大 58dB以下(減圧時)
給水方式	ワンプッシュ自動給水	標準付属品※4	付属品1又は2、ヒーターガード、水受けトレイ取扱説明書、添付文書、製品保証書
使用電源	AC100V 50 / 60 Hz		
消費電力	MAX 1,380 VA	医療機器承認番号	22200BZX00244000
乾燥タイプ	高圧強制加圧乾燥方式	安全規格	JISC 61326-1:2017
安全装置	空焚き防止機能・圧力安全弁・緊急減圧システム・過電流プロテクター		

※1 緊急停止及び乾燥ゼロ設定を行った場合は連続滅菌システムは使用できません。次のご使用まで15分時間をあけてご使用下さい。

※2 乾燥ポンプ用のバクテリアフィルターが消耗しますと乾燥性能が低下します。 ※3 () はハンドル部を含む奥行き

※4 標準付属品として滅菌トレイセット又は滅菌バスケットセットのどちらかを選択いただけます。