

Elite Fuji

High Pressure Sterilizer

MODEL : EAC-4000D



Since 1964 ISO 13485, 14971, 9001

TC-A-Z-1-02-06-00

未包装品用高压蒸汽灭菌器



※2 付属品はご注文時に右の付属品1、又は付属品2から選択ください。

付属品1：滅菌トレーセット

付属品2：滅菌バスケットセット

■ 直径310×奥行545mm、容量38.5Lの大型チャンバーを搭載した132℃、121℃対応のスタンダードモデル

- ・ 間口310φ×420mm 容量38.5Lのチャンバーを搭載しております。直径27cm×高さ18cmの丸カスト2個を余裕をもって収納できます。

■ シンプルな操作パネル

- ・ 操作パネルのスイッチは滅菌時間・乾燥時間・給水・圧力設定・追加乾燥とシンプルになっております。
- ・ チャンバー内への給水はワンプッシュ自動注水、動作モードは滅菌&乾燥のオートモードと追加乾燥のみのドライモードの2種類です。
- ・ 全てのスイッチが独立しており難しい操作を必要としない使い易さを重視に設計されております。
- ・ 滅菌・乾燥の時間設定はパネル部に各設定ごとにデジタル表示されますので一目で設定時間がわかります。
- ・ 乾燥時間は0（ゼロ）設定が可能ですので、歯科用タービンをはじめ乾燥不可/不要な器具にもご使用いただけます。
- ・ 滅菌・乾燥各設定ごとに▲▼ボタンにて時間設定を行えるので設定間違いの心配がなく安心してご使用頂けます。

■ 安全への対策（圧力安全システム）

- ・ 滅菌作業中にブレーカーが落ちてしまったり等の本製品への電源が急に切れた場合、自動的に減圧作業を行い滅菌室内を安全な状態にします。
- ・ 電源スイッチをOFFにする事でいかなる場合でも自動的に滅菌室内の圧力を減圧します。
- ・ その他、空焚き警告、圧力異常上昇防止バルブが設置されておりますので安全にご使用できます。

EAC-4000D 製品規格・仕様

缶体寸法 / 容量	φ310 x 545 mm / 38.5 L	加熱ヒーター	2,000 W
缶体材質	SUS 304 L	外部推奨ブレーカー	AC200V 15 A 以上
システム制御方式	マイクロプロセッサ制御※3	電源ケーブル規格 / コネクター形状	VCTF 2.0 x 3 C / 高圧用引掛プラグ
ドア開閉方式	締め込みハンドル方式	外形寸法 (WxDxH) ※1	575 x 620 (770) x 450 mm
貯水タンク / 容量	本体内部蔵型 / 5.0 L	乾燥重量	59.0 Kg
滅菌温度設定	121 °C / 132 °C 切替スイッチ式	推奨設置面積 (WxD)	605 x 660 mm
動作モード	滅菌&乾燥モード / 追加乾燥モード	動作音	通常 10dB以下, 最大 58dB以下 (減圧時)
給水方式	ワンプッシュ自動給水	標準付属品※2	付属品1又は2、ヒータガード、水受けトレイ取扱説明書、添付文書、製品保証書
使用電源	AC 200V 50 / 60 Hz		
消費電力	MAX 2,000 VA	医療機器承認番号	22200BZX00242000
乾燥タイプ	ヒーター加熱方式	安全規格	JISC 61326-1:2017
安全装置	空焚き防止機能・圧力安全弁・緊急減圧システム・過電流プロテクター		

※1 () はハンドル部を含む奥行き。

※2 標準付属品として滅菌トレーセット又は滅菌バスケットセットのどちらかを選択いただけます。

※3 EAC-4000Dは連続滅菌には対応していないモデルです。滅菌作業終了後から次の滅菌開始まで15分程のインターバルが必要です。